

## Die richtige Anwendung

### Einstellung



- 1 Stellen Sie sich aufrecht wie abgebildet in den Rollator.
- 2 Laufen Sie immer aufrecht **im** Rollator.
- 3 Stellen Sie die richtige Schiebegriffhöhe ein.

Quelle: @macare

### Überwindung von Stufen (bei vorhandener Ankipphilfe)



- 1 Fahren Sie mit dem Rollator an den Beginn der Stufe.
- 2 Treten Sie auf die Stufenhilfe neben dem rechten Hinterrad und ziehen Sie die Handgriffe zu Ihrem Körper.
- 3 Stellen Sie die Vorderräder auf die Stufe und gehen Sie **im** Rollator über die Stufe.

### Richtiges Sitzen



- 1 Drücken Sie die Bremsen nach unten und fixieren Sie den Rollator.
- 2 Stellen Sie sich rückwärts in den Rollator und halten Sie sich beim Hinsetzen an den Griffen fest.
- 3 Für mehr Komfort und Sicherheit nutzen Sie die Handgriffe als Ablage für Ihre Arme.

## Leichtgewichts-Rollator „UPLIVIN Trive“

- › Rollator mit Tasche, Rückengurt und Sitz in Leder-Optik, sowie farblich abgestimmten Handgriffen
- › einzigartigen Doppelfaltmechanismus
- › mit einem Griff schmal und kompakt gefaltet
- › zeitlos klassisches Design
- › inkl. Transporthülle

Griffhöhe	83 - 96 cm	Sitzbreite	45 cm
Gewicht 6,5 - 7 kg (mit Tasche)		Sitzhöhe	58 cm
Belastbarkeit	125 kg	Gesamtbreite	65 cm

Leichtgewichts-Rollator „UPLIVIN Trive“ jetzt nur **€ 399,-** ✓

Bestell-Nr.: 442278



UPLIVIN Trive

## Leichtgewichts-Rollator „Capero“

- › stabiler Rahmen aus Aluminium
- › einfaches falten mit einer Hand
- › Ankipphilfe zum Überwinden von Hindernissen
- › inkl. Rückengurt, Stockhalter und Einkaufsnetz

Griffhöhe	86 - 96 cm	Sitzbreite	45 cm
Gewicht	5,8 kg	Sitzhöhe	54 cm
Belastbarkeit	136 kg	Gesamtbreite	64 cm

Leichtgewichts-Rollator „Capero“ jetzt nur **€ 249,-** ✓

Bestell-Nr.: 435756



Capero

## Leichtgewichts-Rollator „GiGo 2G“

- › stabiler Rahmen aus Aluminium
- › tiefe Sitzfläche mit Rückenpolsterung
- › ergonomische Handgriffe in der Höhe verstellbar
- › Feststellbremse
- › inkl. Korb, Tablett, Rückenstütze und Stockhalter

Griffhöhe	83 - 93,5 cm	Sitzbreite	34 cm
Gewicht	6,8 kg	Sitzhöhe	54 cm
Belastbarkeit	120 kg	Gesamtbreite	63 cm

Leichtgewichts-Rollator „GiGo 2G“ jetzt nur **€ 159,-** ✓

Bestell-Nr.: 440484



GiGo 2G

## Standard-Rollator „Actimo Basic“

- › nutzbar im Innen- und Außenbereich
- › faltbar
- › leicht zu bedienende Bremsgriffe
- › inkl. Stockhalter, Korb, Ablagegitter und Tablett

Griffhöhe	78 - 93 cm	Sitzbreite	38 cm
Gewicht	9 kg	Sitzhöhe	61 cm
Belastbarkeit	130 kg	Gesamtbreite	60 cm

Standard-Rollator „Actimo Basic“ jetzt nur **€ 89,-** ✓

Bestell-Nr.: 440977

Die „erstattungsfähige“ Krankenkassenvariante\*



Actimo Basic

SANIMED

Die neuen Rollator-Modelle 2025

Angebote gültig bis 31.12.2025

Mobil durchs Leben!  
Mit Sicherheit und Komfort



! Wird komplett montiert geliefert und ist sofort fahrbereit!

\* Sofern Sie nicht befreit sind, fällt lediglich die gesetzliche Zuzahlung an.

## Ultraleichter Carbon-Rollator „Athlon“

- › klappbar und einfach zu tragen
- › ergonomisch geformte, höhenverstellbare Schiebegriffe
- › ausgestattet mit Softrädern
- › hohe Stabilität und Sicherheit beim Gehen
- › inkl. Rollatortasche

Griffhöhe	66 - 86 cm*	Sitzbreite	46 cm
Gewicht	ab 5,1 kg (+Tasche)*	Sitzhöhe	55 cm*
Belastbarkeit	150 kg	Gesamtbreite	61 cm

\*die angegebenen Maße entsprechen dem Athlon in Gr. M

**Ultraleichter Carbon-Rollator „Athlon“ jetzt nur € 479,- ✓**

Bestell-Nr.: ● ferrari rot: 438148 (Gr. M), 438150 (Gr. L)  
● schwarz carbon: 438149 (Gr. M), 438151 (Gr. L)

Athlon

## Outdoor-Rollator „Gemino 30 Comfort“

- › verwendbar sowohl im Innen- als auch Außenbereich
- › extra starker Rollator-Korb (belastbar bis 10 kg)
- › große, stoßdämpfende Räder
- › einfaches Falten mit einer Hand
- › inkl. Korb

Griffhöhe	80 - 102 cm	Sitzbreite	47 cm
Gewicht	8 kg	Sitzhöhe	64 cm
Belastbarkeit	150 kg	Gesamtbreite	60 cm

**Outdoor-Rollator „Gemino 30 Comfort“ jetzt nur € 419,- ✓**

Bestell-Nr.: 437929

Gemino 30 Comfort

## Leichtgewichts-Rollator „Nitro“

- › extragroße 25 cm Lenkräder
- › gepolsterte Sitzfläche
- › Einhand-Faltmechanismus
- › passive Beleuchtung hinten, vorne und seitlich
- › Gepäcknetz mit Reißverschluss
- › inkl. Stockhalter und Rückengurt
- › Ankipphilfe zum Überwinden von Hindernissen

Griffhöhe	84 - 96,5 cm	Sitzbreite	44,5 cm
Gewicht	7,2 kg	Sitzhöhe	57 cm
Belastbarkeit	130 kg	Gesamtbreite	61 cm

**Leichtgewichts-Rollator „Nitro“ jetzt nur € 319,- ✓**

Bestell-Nr.: 440252

Nitro

## Leichtgewichts-Rollator „Mobilex Leopard“

- › ausgesprochen stabil und leicht manövrierbar
- › große, leicht laufende Räder
- › leichtgängige und arretierbare Bremsen
- › inkl. Transportsicherung, abnehmbarer Einkaufstasche, Rückengurt und Stockhalter
- › große Auswahl an zurüstbarem Zubehör
- › auf Benutzergewicht von 150 kg getestet

Griffhöhe	74 - 102 cm	Sitzbreite	46 cm
Gewicht	7,6 kg	Sitzhöhe	62 cm
Belastbarkeit	150 kg	Gesamtbreite	60 cm

**Leichtgewichts-Rollator „Leopard“ jetzt nur € 299,- ✓**

Bestell-Nr.: 439469

Mobilex Leopard

## Leichtgewichts-Rollator „RUSSKA Elan Classic“

- › ergonomische Griffe
- › stabiler Aluminiumrahmen
- › integrierte Faltsicherung
- › mit Rückengurt und Stockhalter
- › inkl. Gepäcknetz
- › Ankipphilfe zum Überwinden von Hindernissen

Griffhöhe	76 - 95,5 cm	Sitzbreite	44 cm
Gewicht (o. Zubehör)	6,1 kg	Sitzhöhe	60 cm
Belastbarkeit	150 kg	Gesamtbreite	61,5 cm

**Leichtgewichts-Rollator „Elan Classic“ jetzt nur € 279,- ✓**

Bestell-Nr.: 440122

Elan Classic

5 Jahre Garantie



Wird komplett montiert geliefert und ist sofort fahrbereit!

Ihre Bestellung bequem nach Hause

Versandkostenfreie Bestellung

Telefonische Bestellung: 05451-923 400  
Mo. – Fr.: 8.00 bis 16:30 Uhr

Kunden-Nr. Geburtsdatum

Name/Vorname

Straße/Nr.

PLZ/Wohnort

Telefon

Ich bestelle auf Rechnung mit 14 Tagen Rückgaberecht:

Bestell-Nr.	Anzahl	Preis

Alle Preise inkl. Versand und MwSt. / Angebote gültig bis 31.12.2025

Für diese Bestellung liegt ein Rezept vor?  
(Bitte ankreuzen und per Post an SANIMED)

Ja  Nein

Von vielen Krankenkassen wird ein Teilbetrag erstattet. Sie erhalten von uns ein entsprechendes schriftliches Angebot.



Datum/Unterschrift

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen und senden an:  
SANIMED GmbH · Gildestraße 68 · 49479 Ibbenbüren  
E-Mail: info@sanimed.de  
Fax: 05451-923 9500

SANIMED